

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI IOT



In questa guida verrà illustrato passaggio per passaggio la registrazione e attivazione del servizio IOT fornito da TECNO-GAZ.



INTRODUZIONE


- Ordinando uno dei servizi IOT riceverete una scatola contenente la key per l'attivazione.



- Sulla scatola ci sarà un'etichetta indicante il numero di matricola del prodotto.



- Nel caso l'etichetta sulla scatola si rovini sarà possibile osservare l'etichetta anche sulla key fornita all'interno.
- Inserire la key e procedere come da seguito.

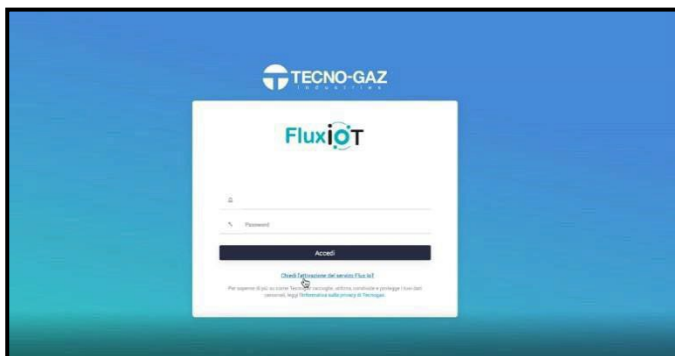

Step 1)

- Chiedere l'attivazione del servizio IoT.


I servizi IoT in questione sono tre :

- Flux IoT <https://s.tecnogaz.com/masterflux/#/Login>
- Clean IoT <https://s.tecnogaz.com/clean/#/Login>
- Steam IoT <https://s.tecnogaz.com/steam/#/Login>




Step 2)

-Inserire il codice del contratto nell' apposito campo (codice reperibile sulla scatola o sulla key).

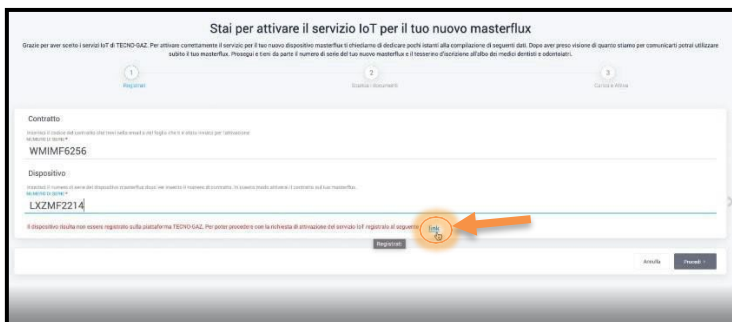


Step 3)

-Inserire il numero di serie del dispositivo (codice reperibile sulla scatola o sulla key).
-Se non siete già registrati alla piattaforma TECNO-GAZ premere sul link blu.

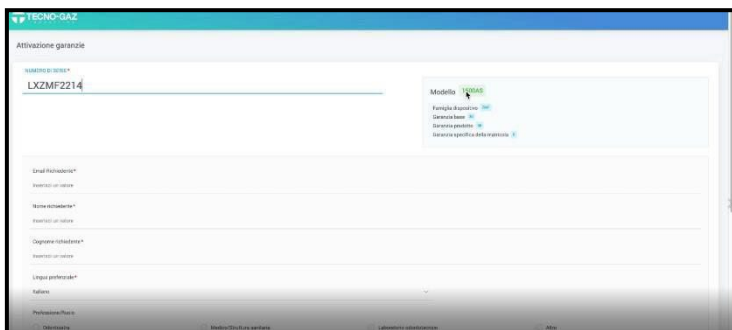

Step 4)

-Reinserire il numero di serie del dispositivo

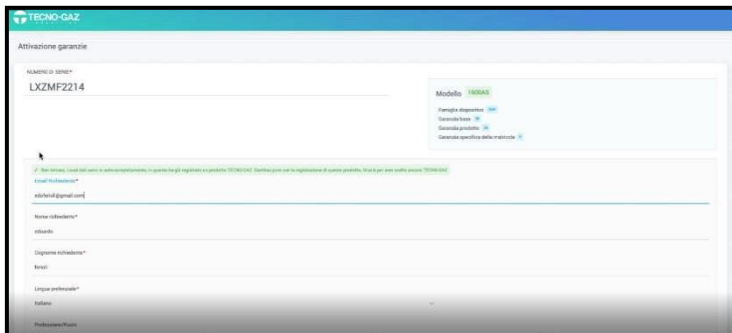


Step 5)

-Compilare accuratamente tutti i campi .
-Se la mail richiedente risulta essere già registrata per un prodotto TECNO-GAZ il modulo verrà autocompilato




Step 6)

-Verificare di aver compilato tutti i campi.
-Spuntare con le spunte blu i riquadri in basso.
-Premere su "Registra garanzia".

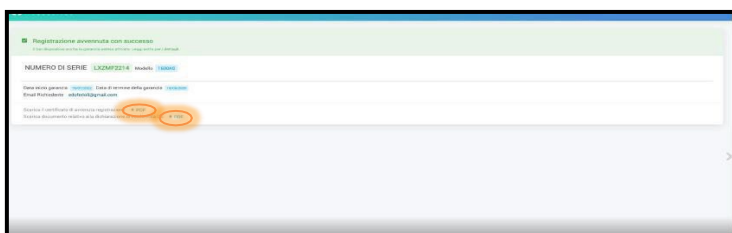


Step 7)


-Registrazione avvenuta con successo.
-Se si desidera si puo' scaricare sia il certificato di avvenuta registrazione, sia il documento relativo alle dichiarazioni di conformità.
-Verrete reindirizzati sulla pagina iniziale.

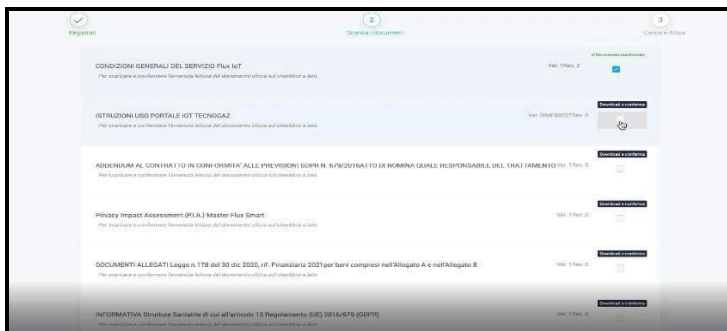


Step 13)
-Eeguire lo stesso passaggio per tutti i documenti presenti .

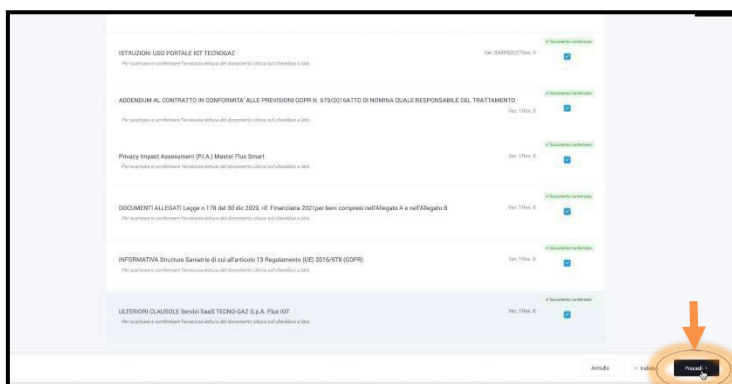

Step 14)
-Una volta scaricati e salvati tutti i documenti premere su "Procedi".

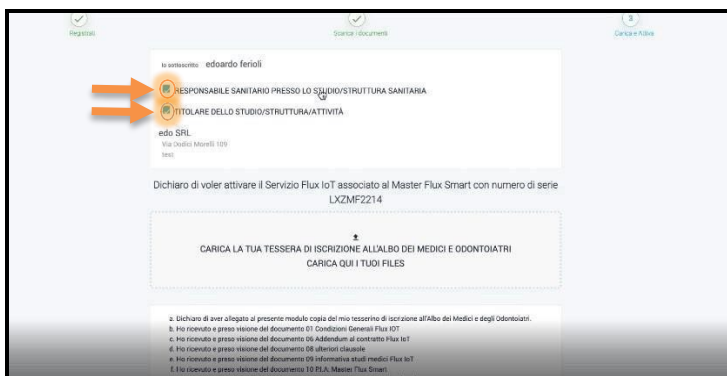

Step 15)
-Spuntare una sola o ambedue le spunte .

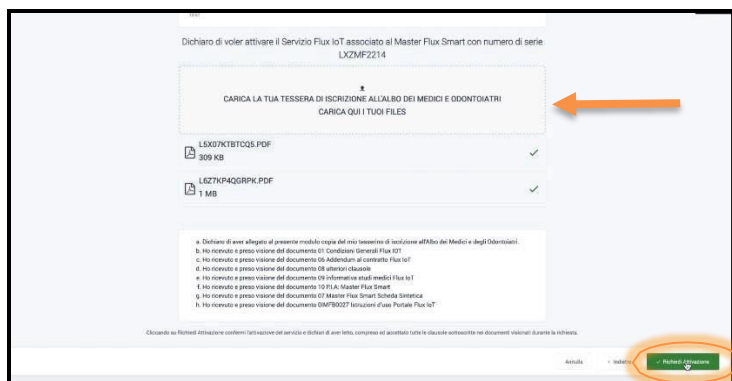

Step 16)
-Caricare la tessera di iscrizione all'albo dei medici e odontoiatri nell' apposito riquadro.
-Premere su "Richiedi attivazione".



Step 17)
-Contratto registrato correttamente ora è possibile accedere al servizio.

-Riceverai per E-mail il certificato di attivazione del servizio.