


## USO SERVIZIO STEAM IOT


*Il seguente documento sostituisce il paragrafo 12 del manuale utente.*

Attivare la garanzia prodotto o eseguire l'installazione attraverso App Mobile "TECNO-GAZ".

Collegarsi alla pagina web: **s.tecnogaz.com/steam/** tramite la barra degli indirizzi del browser.

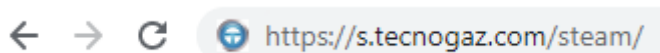

Successivamente si aprirà la seguente schermata:

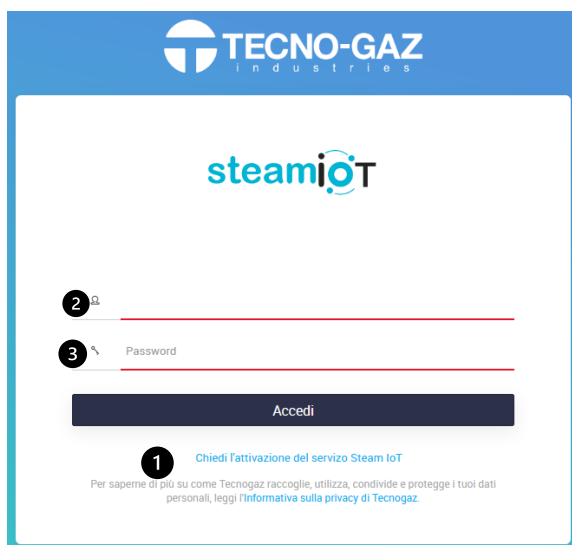

### Servizio Steam IoT da attivare

Se il servizio Steam IoT non è attivato, cliccare "Chiedi l'attivazione del servizio Steam IoT" (1) e seguire le istruzioni.

Quando tutta la documentazione sarà approvata e TECNO-GAZ riceverà quanto richiesto, il servizio Steam IoT sarà attivato.


Non è possibile attivare il servizio senza il completamento della documentazione da accettare e da caricare sul portale.




## Servizio Steam IoT attivato

Inserire nome utente (❷) e password (❸)

Una volta attivato il servizio, dopo essersi loggati, apparirà la seguente schermata.

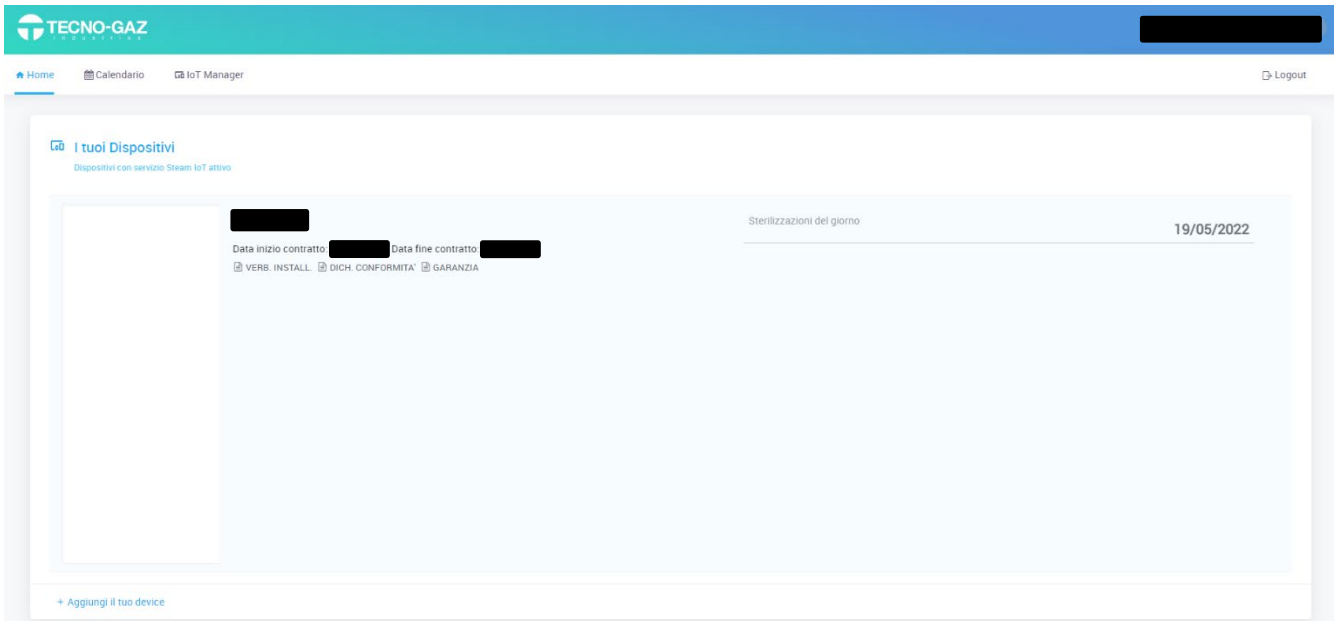

Selezionare “Calendario” per visualizzare i cicli effettuati.

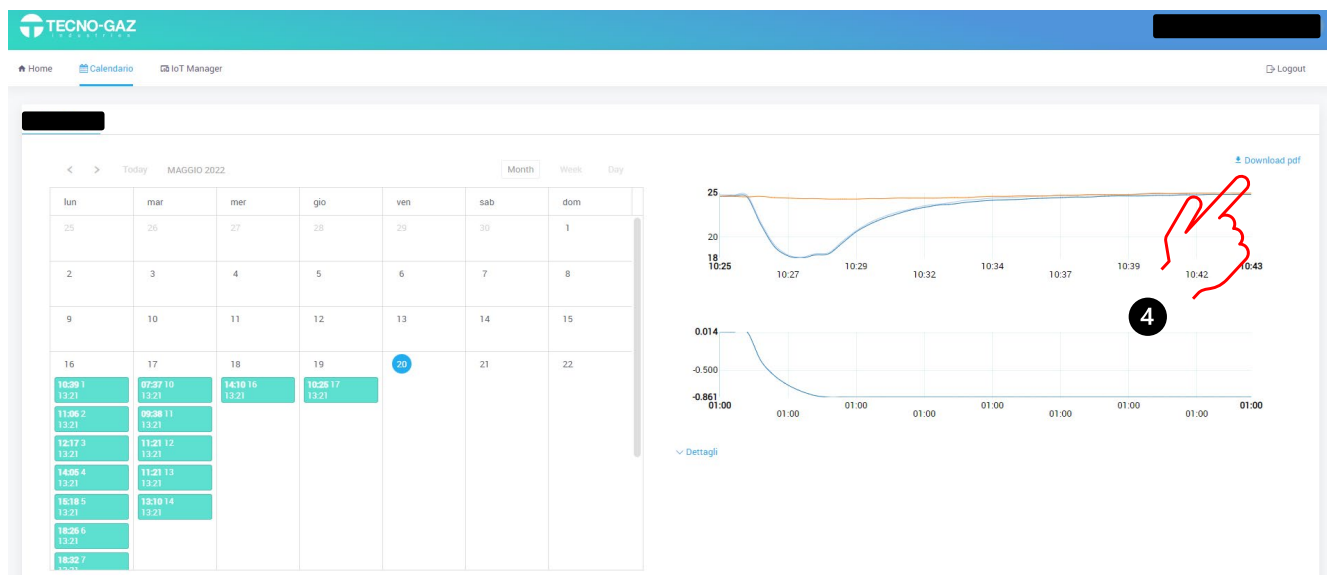

Selezionando un determinato ciclo all'interno di un determinato giorno, è possibile visualizzare nella parte destra l'andamento delle grandezze caratteristiche. Selezionando “Download PDF” è possibile scaricare il file del ciclo in formato PDF (❹).

## Selezionare “IoT Manager” per caricare online i log dei cicli dalla SD Card

Nella parte sinistra dello schermo, l'utente ha la possibilità di caricare i cicli da SD Card premendo il pulsante “Upload” (5).

Inserire la scheda di memoria SD nel proprio computer. Aprire la cartella “LOG” e selezionare i cicli da caricare sulla pagina online.

Nella parte destra dello schermo l'utente ha la possibilità di visualizzare (6) ed esportare tramite PDF (7) i log dei cicli effettuati dall'autoclave.