

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAVOLO 30.E0023**
**INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TABLE 30.E0023**
**Tabella Specifiche Elementi (contenuto della confezione) / Box Content:**

| Codice/Code | Nome/Description                           | Quantità/Quantity |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>    | Vassoio / Base                             | <b>1</b>          |
| <b>2</b>    | Piastra / Frame                            | <b>1</b>          |
| <b>3</b>    | Struttura ad H / "H" Structure             | <b>1</b>          |
| <b>4</b>    | Piede a T con ruote / "T" Foot with wheels | <b>2</b>          |
| <b>5</b>    | Pomello in plastica / Plastic Handle       | <b>4</b>          |

**Istruzioni / Instructions:**

1. Appoggiare la piastra (2) sul pavimento con gli incastri verso l'alto; / Lay the frame (2) on the floor keeping the holes in upper position;
2. Infilare la struttura ad H (3) negli incastri e avvitare due pomelli (5) negli appositi fori di fissaggio; / Insert the "H" structure (3) in the holes and screw the two plastic handles (5);
3. Infilare i piedi a T completi di ruote (4) con i fori per i pomelli rivolti all'interno e avvitare i due pomelli (5) rimanenti nella confezione; / Insert the "T" feet (4) complete with wheels in the side holes and screw the two remaining plastic handles (5);
4. Girare la struttura e appoggiarla sulle ruote; / Turn the structure upside down and lay it on the wheels;
5. Appoggiare sulla piastra (2) il vassoio (1); / Lay the base (1) on the frame(2);

