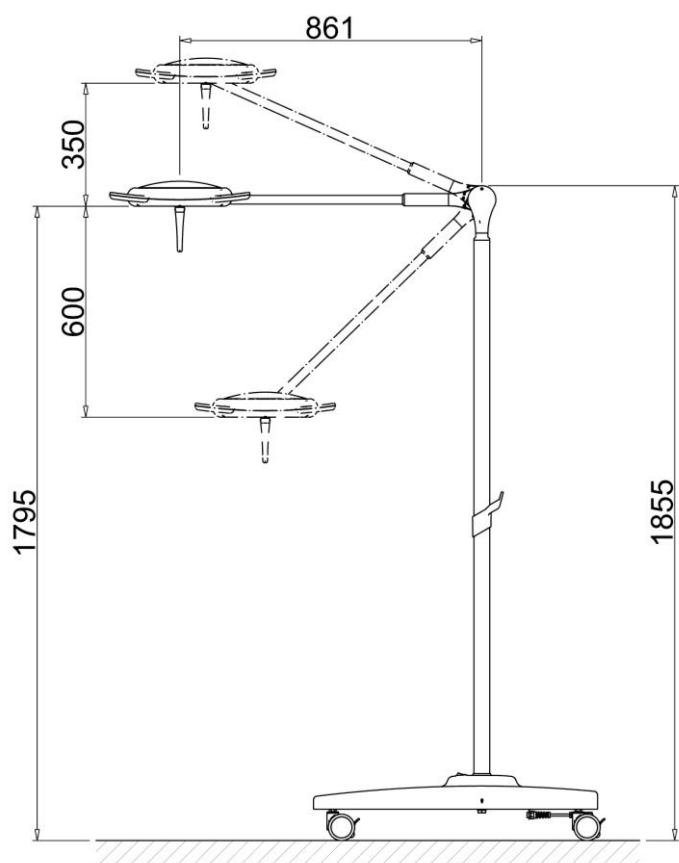


SLIM

PROPIEDADES TÉCNICAS


Rendimiento	
	Slim
Intensidad de la luz (Ec)	100klx
Temperatura de color (K)	4500
Índice de reproducción cromática (CRI)	96
Fuente de luz	n°12 Led
Focalización	Fissa
Profundidad del campo de luz(60%)	85 cm
Diámetro del campo de luz d ₁₀	16 cm
Energía irradiada	414 W/m ²
Datos eléctricos	
Tensión primaria (Vac)	100÷240 V
Tensión secundaria (Vdc)	24 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de energía	40 VA

Modelo de piso SLIM

 TECNO-GAZ	Lámpara SLIM versión de piso	ES	07 Junio 2022
		Rev.2	Página 2 / 3

- CABLEADO CORRECTO DE LAS INSTALACIONES

Los locales utilizados con fines médicos deberán estar cableados de forma segura y de manera profesional por personal cualificado.

El personal calificado incluye, pero no se limita a, las siguientes figuras profesionales:

Ingeniero Eléctrico Experto electrotécnico cualificado para trabajar como electricista.

El sistema de cableado del entorno (locales) en el que se realiza la instalación debe estar en conformidad con las normas CEI 64-8 (regulaciones informáticas para locales utilizados con fines médicos) y con las leyes y / o regulaciones nacionales aplicables.

El sistema eléctrico debe estar certificado por un electricista calificado para emitir el certificado de conformidad.

El sistema de tierra debe estar certificado según lo requerido por las regulaciones aplicables.

El sistema eléctrico debe prever el tendido de cables adecuados a las características eléctricas del Producto a suministrar.

El sistema eléctrico debe contar con un fusible de protección o un interruptor de desconexión magnética térmica aguas arriba del Producto, para evitar el riesgo de que se dañe debido a fallas y / o mal funcionamiento de la red eléctrica.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Sobre la base de los puntos anteriores, certificamos que la preparación del sistema eléctrico se ha realizado de manera segura, de acuerdo con la regla del arte.

IMPORTANTE:

TECNO-GAZ S.p.a. se exime de toda responsabilidad por cualquier tipo de avería o daño que pueda producirse con el paso del tiempo debido a la no afección del sistema eléctrico instalado en las instalaciones

ÁREA OPERATIVA DEL PRODUCTO

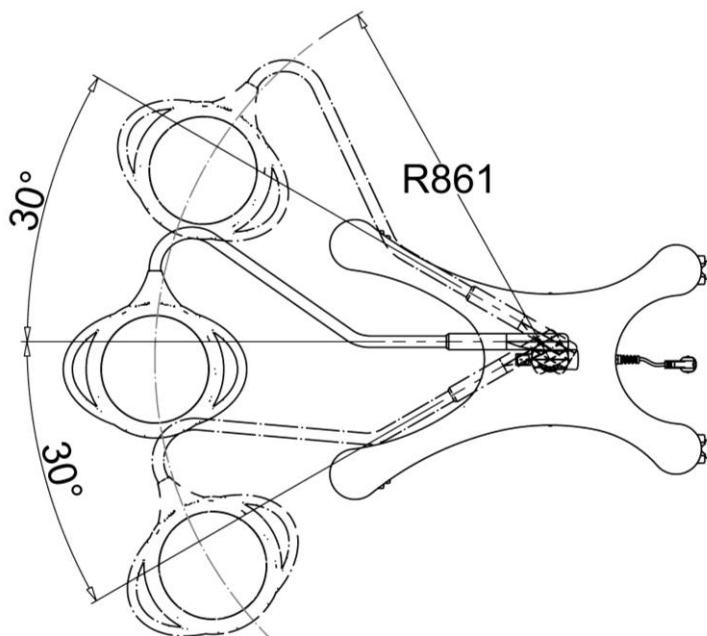

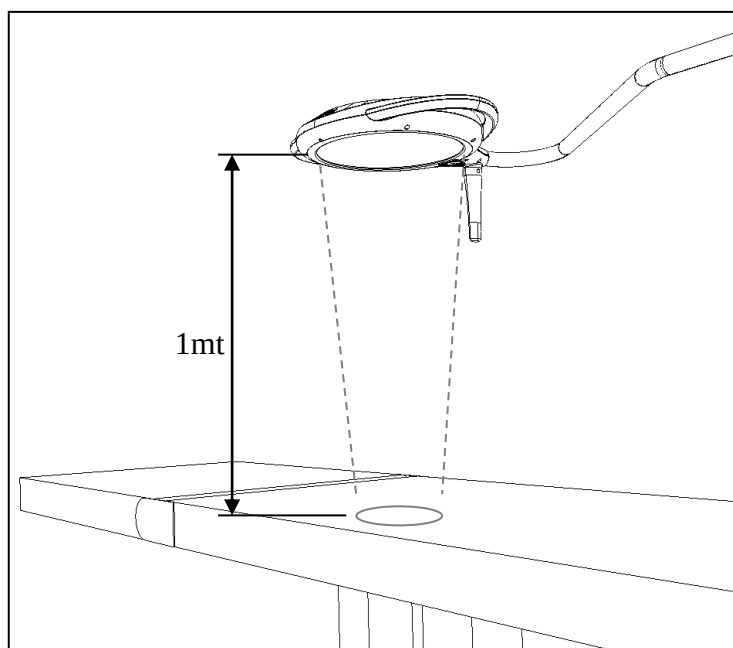DISTANCIA DE TRABAJO

Para tener la optimización de la intensidad de la luz, recomendamos utilizar el producto a una distancia de 1m.

Sin embargo, el producto proporciona una buena intensidad de luz incluso cuando se usa a una distancia de 70 cm a 140 cm.